



1

Wejdź na stronę <http://heartsine.com/support/upload-saver-evo/>

W środkowej części strony kliknij plik **download** – pobieranie rozpocznie się automatycznie. Zapisz program na pulpicie i przygotuj swój Defibrylator AED. Odsłoń niebieską osłonę zabezpieczającą wejście USB i wsuń w nią niebieską końcówkę kabla. Drugą końcówkę wepnij w wejście USB w swoim komputerze. Po podłączeniu uruchom program Saver EVO.

2

Po uruchomieniu programu wejdź kolejno w
>> Samaritan PAD
>> DANE Defibrylatora AED

Program wyświetli listę zdarzeń z której należy wybrać, (sprawdzając datę zdarzenia i czas trwania) zdarzenie, które mamy przesłać.

Wybierz zdarzenie do pobrania

#	Data	Godzina	Czas trw...
1	09 cze 2014	16:44:53	00:00:12




3

Następnie wchodzimy dwa razy klikając w to zdarzenie. Wyświetli się zapis EKG.

4

Zapisujemy zdarzenie klikając w **ZAPISZ**.

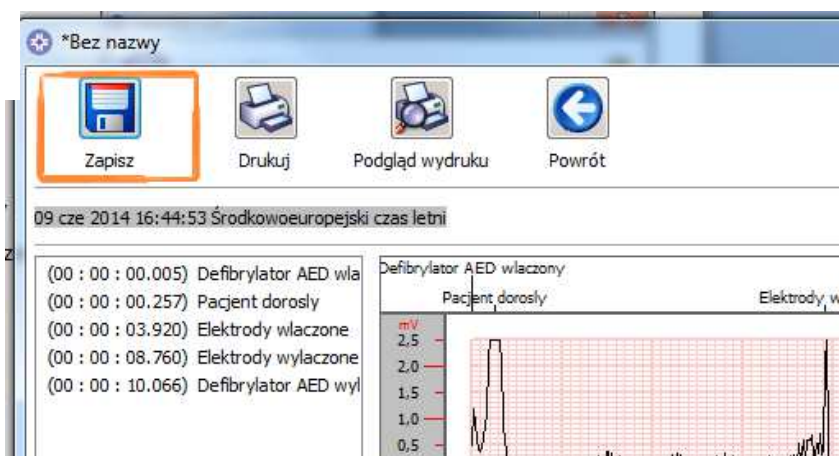

5


Wpisujemy imię i nazwisko Osoby tworzącej raport lub Pacjenta , datę urodzenia Pacjenta oraz numer ID będący dowolnym ciągiem cyfr.

6


Klikamy **ZAPISZ**.

7

Klikamy 3 krotnie w przyciski **POWRÓT**, tak aby powrócić do pierwszego widoku menu, a następnie klikamy w ikonę

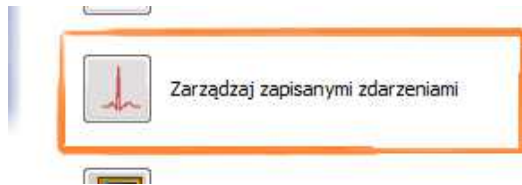

W tym miejscu zaznaczamy zdarzenie wybrane do zapisania i klikamy w ikonę **EKSPORTUJ**

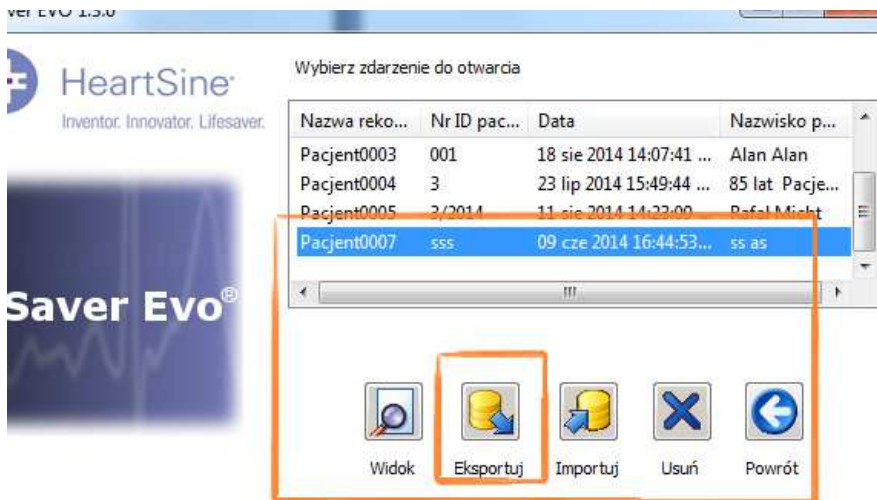

8

Zapisujemy plik na pulpicie. Plik ma rozszerzenie .evo. Prosimy o przesłanie go na adres: biuro@hsmedical.pl wraz z raportem zdarzenia jeśli ten również przesyłany jest drogą mailową lub na adres innej osoby z naszej firmy, która miała z Państwem kontakt.

POTRZEBUJESZ DODATKOWEJ POMOCY?

Zadzwoń: **+ 48 786 86 80 32**

